

アプリでInBody結果が管理できます。

- * 測定後に画面右上に表示されるQRコードボタンをクリックし、InBodyアプリで読み取る必要があります。結果用紙にQRコードが印字される場合、用紙からの読み取りも可能です。
- * QRコードを読み取ってアプリで管理できる体成分情報は、全身の主要項目に限られます。

まずはInBodyアプリをダウンロードしてください。



InBody(無料)

Google Playストア、またはApp Storeからアプリケーションをダウンロードできます。



アプリのダウンロード
【iOS版】



アプリのダウンロード
【Android版】*

- <互換性>
- iPhone: iOS8.0以上 ○ Android: 5.0以上
 - * タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。
 - * 通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。

* QRコードが読み取れない場合は、Google Playストア内から「インボディ」で検索してください。

ダウンロード完了後にInBodyアプリを起動して、新規登録を行ってください。




① InBodyアプリを起動し、携帯番号を入力してください。



② メールアドレス・性別・身長・年齢・パスワードを入力してください。



③ 製品設定画面にある「業務用InBody」を選択してください。

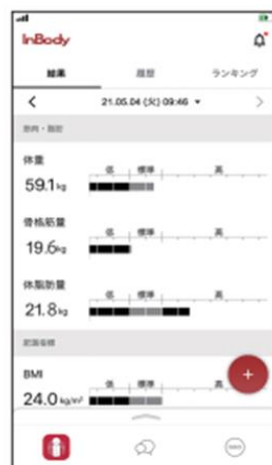

④ 測定結果が棒グラフで表示されます。



⑤ 画面最下段の「InBody結果用紙閲覧」を選択すると、InBodyから印刷される結果用紙の形式で確認することができます。



InBodyアプリについてご不明な点がありましたら、

株式会社インボディ・ジャパン カスタマーセンター (フリーアクセス 0120-900-369 [平日 9:00 ~ 18:00]) までお問い合わせください。